

# Pro ephy®

## MASQUES CHIRURGICAUX Non tissé

**TYPE IIR  
EN 14683 : 2019  
3 PLIS**

Efficacité de Protection > 98 %  
Usage unique



### > Utilisation

Masques de Type IIR selon la norme EN 14683:2019 relative aux masques chirurgicaux. Milieu hospitalier en général, centre de soins.

- Masque à haute filtration, couvre la bouche, le nez et le menton.
- Porté par la personne contagieuse, il prévient la contamination de l'entourage et de l'environnement.
- Porté par le soignant, le masque prévient la contamination du patient et de son environnement (air, surfaces, produits,...).
- Protège contre les agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes ».
- Durée d'utilisation : 3 heures.

### > Mode d'emploi

Masque à utilisation courte et à usage unique.

Lavez-vous les mains avant de porter un masque.

Tenez les lanières avec les deux mains et couvrir le nez, la bouche et le menton.

Ajuster la barrette nasale sur le nez et bien la serrer.

Assurer l'étanchéité sur le nez, la bouche et le menton.

Jeter après utilisation.

### > Caractéristiques

- Matière :
  - complexe très haute filtration non tissé 3 plis, dont 1 filtre en microfibre.
  - face externe bleue en spunbond polypropylène.
  - face interne blanche hypoallergénique en thermobondé polypropylène.
- Filtre : ..... 100 % microfibre de polypropylène sans fibre de verre.
- Barrette nasale : ..... antibuée incorporée.
- Liens : ..... polyester, fixations auriculaires.
- Agent liant : ..... d'origine acrylique.
- Dimensions : ..... longueur à plat : 175 mm x largeur à plat : 95 mm.
- Résistance aux éclaboussures : ISO22609:2004
- Efficacité de la filtration bactérienne : EN14683:2019 Annexe B > 98 %
- Tolérance : ..... +/- 2 %.
- Poids : ..... 5,1 g

Conforme à la directive Européenne 90/128/CEE.

Références normatives : Testé selon la norme EN 14683 : 2019 Annexe B.

Classification Type IIR. Efficacité de filtration bactérienne (EFB) :

- Efficacité de protection > 98 %

- Responsabilité < 29,4 Pa

Certification TUV



### > Précautions d'emploi

Ce masque est un masque à usage unique à ne pas réutiliser et à ne pas conserver autour du cou. Durée d'utilisation recommandée : 4 heures.

Date de péremption : 3 ans après la date de fabrication.

A stocker dans un endroit sec et ventilé.

### > Logistique

| Masque                            |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement                   | boîte de 50 pcs               |
| Colis                             | 1000 pcs<br>(20 bts x 50 pcs) |
| Colis dimensions extérieures (cm) | 52 x 38 x 34 H                |
| Poids brut                        | 8,1 kg                        |
| Code produit                      | 343033A                       |

Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION